



Prueba simultánea de Dengue NS1 Ag y IgG/IgM Ab

Los virus del Dengue, transmitidos por el mosquito *Aedes aegypti* y *Aedes albopictus*, están distribuidos ampliamente en las áreas tropicales y sub-tropicales del mundo. Existen cuatro serotipos distintivos conocidos (virus del dengue 1, 2, 3 y 4). La NS1 es una glicoproteína altamente conservada que está presente en altas concentraciones en los sueros de pacientes infectados durante la etapa clínica inicial de la enfermedad. El antígeno NS1 se encuentra desde el primer día y hasta 9 días después del inicio de la fiebre en muestras de pacientes primarios y secundarios infectados con dengue.

Información General

Esta prueba rápida de SD BIOLINE Dengue Duo contiene dos dispositivos (lado izquierdo: Prueba de Dengue NS1 Ag; lado derecho: Prueba de Dengue IgG/IgM)

- Diagnóstico perfecto para la detección de infección de dengue durante todas las etapas.
- Detección simultánea de Dengue NS1 Ag e IgG/IgM Ab
- Diagnóstico de Dengue NS1 Ag incluso durante el periodo de ventana
- Prueba rápida fácil de usar (resultados de prueba: 15-20 minutos)
- Almacenamiento: 24 meses a temperatura ambiental (1-30°C)

Artículo	Prueba rápida de Dengue NS1 Ag	Prueba rápida de Dengue IgG/IgM
Posición	Lado izquierdo	Lado derecho
Uso	Determinación cualitativa del antígeno del virus del Dengue NS1	Detección de anticuerpos IgG e IgM del virus del dengue
Propósito	Diagnóstico temprano de una infección aguda de dengue	El presunto diagnóstico entre la infección primaria y secundaria del dengue
Sensibilidad	92.8%	99.4%
Especificidad	98.4%	93%
Método comparado	P.f-PCR y/o cultivo viral	Prueba HI

Materiales Suministrados

- Dispositivo de prueba SD BIOLINE NS1 Ag e IgG/IgM (W/B)
- Diluyente de ensayo
- Pipeta capilar (10µl) para la prueba IgG/IgM
- Gotero desechable para la prueba de NS1 Ag

Procedimiento de la Prueba



Interpretación

Positivo

Negativo

Información para Pedidos

Cat. No.	Descripción	Muestra	Tipo	Tamaño
11FK45	Prueba de Dengue NS1 Ag e IgG/IgM Ab	Suero, Plasma, Sangre total	Dispositivo combo	1Tx10/Kit
11FK46	Prueba de Dengue NS1 Ag e IgG/IgM Ab	Suero, Plasma, Sangre total	Dispositivo combo	1Tx25/Kit

ERROR: rangecheck
OFFENDING COMMAND: .buildshading2

STACK:

-dictionary-
-dictionary-
-savelevel-